



Experts in Blood Pressure Management™

PharmaSmart®

Instructions de Recharge

Comment recharger une carte à puce de
tension artérielle

Voir les instructions au verso

Instructions de Recharge

Les cartes à puce de tension artérielle sont vendues aux clients pour une durée de deux ans. Cependant, les cartes à puce de tension artérielle ont été programmées pour avoir une durée de 365 jours. Si vous avez besoin de RECHARGER la carte à puce de tension artérielle d'un patient dont la date d'expiration est échue ou le sera sous peu, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

Procédure pour recharger les cartes à puce de tension artérielle à l'aide de la carte maîtresse de recharge PharmaSmart ci-jointe (carte bleue et blanche). Cette carte est valide pour recharger 50 cartes à puce de tension artérielle.

1. Bien insérer jusqu'au fond la carte maîtresse de recharge PharmaSmart dans le lecteur de carte à puce dans le sens indiqué sur la carte (voir la flèche blanche INSERT THIS WAY)
2. Un menu déroulant apparaîtra et l'option de recharge (option 1) sera en surbrillance rouge (**1 : Recharge Smart Card**)
3. Si vous désirez changer la langue pour obtenir les instructions en français allez au point 4, sinon sautez au point 7.
4. Appuyez sur le bouton **ARRÊT/STOP** pour défiler le menu jusqu'à l'option **5. Set language preference** et appuyer sur le bouton vert **DÉPART**
5. Appuyez sur le bouton **ARRÊT/STOP** pour vous rendre à l'option **2. French** et appuyer sur le bouton vert **DÉPART**
6. Appuyez sur le bouton **ARRÊT/STOP** pour revenir jusqu'à l'option **1 : Recharger carte à puce**
7. Appuyer sur le bouton vert **DÉPART**. L'appareil soustraira une (1) recharge du total restant sur la carte maîtresse et la carte sera alors éjectée automatiquement. Retirez la carte maîtresse;
8. Insérez la carte à puce de tension artérielle à être rechargée jusqu'au fond du lecteur; la carte est alors rechargée pour une durée de 365 jours et sera éjectée automatiquement. Retirez la carte du lecteur;
9. Le menu déroulant est réapparu. Appuyez sur le bouton rouge **ARRÊT/STOP** pour défiler le menu jusqu'à l'option **7 : Exit ou Sortie**
10. Appuyer sur le bouton vert **DÉPART** pour quitter le menu déroulant. La recharge est complétée et la carte à puce de tension artérielle est rechargée pour une durée de 365 jours.

Si le processus de recharge n'a pas réussi, la carte à puce de tension artérielle doit être insérée à nouveau et vous devez refaire les étapes (2 à 10) sinon, la carte à puce de tension artérielle ne sera pas rechargée.

Si vous ne réussissez pas à recharger la carte à puce de tension artérielle, réinsérez la carte maîtresse de recharge PharmaSmart dans le lecteur, l'appareil créditera la carte maîtresse d'une recharge et la carte sera éjectée. Essayez de refaire le processus de recharge à nouveau et si vous ne réussissez pas, communiquez avec PharmaSmart au (800) 781-0323



Scanner ce code à barres pour passer à la caisse. (*si applicable)

PSI-RCG-047-MF-00